



Produktdatenblatt

SARS-Cov-2 Antigen Schnelltestkassette (Speichel) – „Lolli“ Schnelltest

SARS-Cov-2 Antigen Schnelltestkassette (Speichel) von Spring Healthcare Services

Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte **AT 351/21**, Ausführung nur durch **geschultes** Personal.

Erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung.

Laienzulassung beantragt.

Highlights

- Ohne Altersbeschränkung -> ideal für Schulen, KiTas, Senioren- und Pflegeheime
- Kinderleichte Handhabung durch Lolli-Prinzip
- Schmerzfrei, unkompliziert, schnell, sicher, kinderleicht
- Kein unangenehmer Hals-Nasen-Rachen-Abstrich
- Kein Spucken, keine Schmerzen, kein unangenehmes Nasebohren

Technische Daten*

- Spezifität 99,57%
- Sensitivität von **97,10%**
- Genauigkeit **99,57%**
- Hoher kolloidaler Goldgehalt
- Hergestellt in Europa, CE-zertifiziert
- Schnelles Ergebnis (10 – 20 Minuten)
- VPE: 20 Tests pro Box, 50 Boxen pro Umkarton (-> ein Karton á 1.000 Tests)
- Maße einer Box: 200 / 175 / 70 mm

Durchführung – vereinfacht beschrieben (bitte Beipackzettel vor der Anwendung lesen)*

- Mindestens 10 Minuten vor der Durchführung keine Nahrungsmittel, Getränke, Kaugummi oder Tabakprodukte zu sich nehmen.
- Zwei Mal husten und dann den Tupfer wie im Beipackzettel beschrieben im Mund bewegen.
- Tupferkopf im Sammelröhrchen abbrechen, verschließen und schütteln
- 3 Tropfen auf die Testkassette und 10 - 15 Minuten warten

Zahlung und Lieferung

- Alle Preise netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt.
- Ware auf Lager und sofort abrufbereit.
- Lieferung frei Haus ab 1.000 € Bestellwert, Lieferzeit 2-4 Tage.
- Zahlung: 4 Tage nach Lieferung, ab einem Bestellwert von 10.000€ netto 100 % Vorkasse.

Gewährleistung

Die Herstellerangaben wurden durch eine unabhängig durchgeführte Studie mit 330 Probanden separat geprüft und belegt.

*Die Angaben sind Herstellerangaben, für die wir keine Gewährleistung und Haftung übernehmen.